

特定非営利活動法人 お世話宅配便

ノッテコン取扱説明書

必ずお読みください




ノッテコンの使用法

ゲーム操作方法は、基本的には Wii-Fit と変わりありません。


ただし、ゲーム開始直前のバランスボードでの体重設定のところが異なりますので、以下に説明します。

通常の手順で **バランスゲーム** を選択し、その中の **コロコロ玉入れ** を選択したとします。


ここで、**始める** を押すと右のような映像が出てきますので

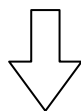



何も乗らない状態で電源ボタンを押します。

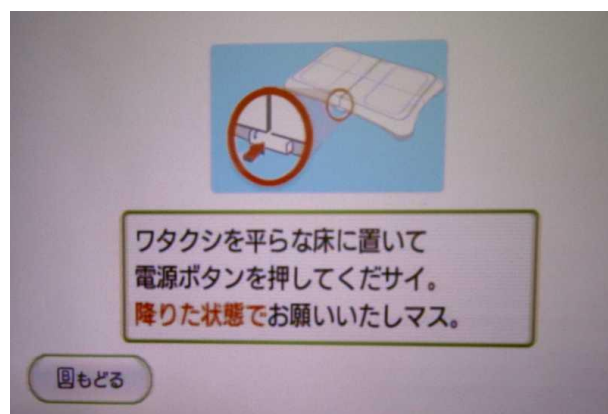

次も、右のような映像が出てきますので

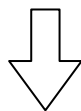


車いすではなく、介助の方が代わりに乗ります。

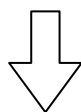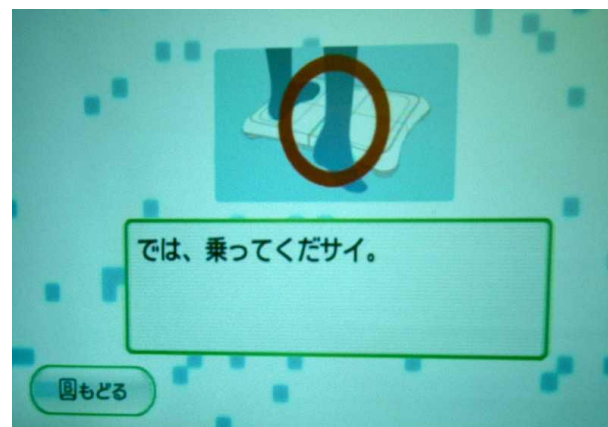

最後に、右のような映像が出てきたらそのあとでノッテコンを乗せ、その上に車いすの方も乗ります。

車いすを乗せる時は、ノッテコンの表面に描かれている太線交点に、重心位置が来るようにして、ブレーキ固定します。

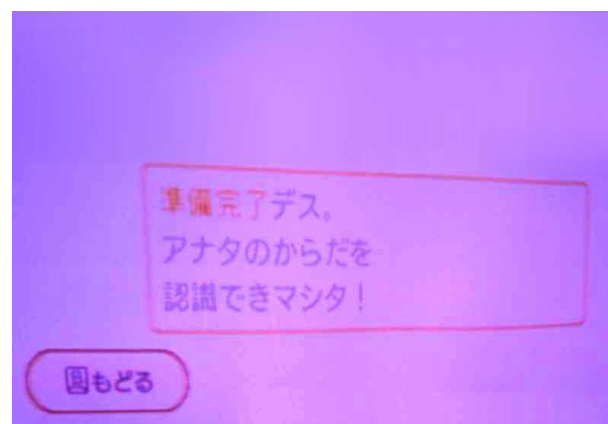

ゲーム開始の (A) ボタンを押します

ノッテコンの調整方法

前頁の手順でゲームを開始しても、思うように動かさない場合があります。その時の対処法を、以下に説明します。

1. ゲームが右側または左側にばかり、寄ってしまう。あるいは、前方には進めるが手前にはなかなか動けないような状態。

車いすの固定位置が悪く、車いすの重心がバランスボードの中心からずれています。

車いすの固定位置が左右の丁度中央にきているか、ノッテコンの中央縦太線を目印にして確認調整しましょう。

手前あるいは後方向になかなか進めない時は、車いすの重心位置が、ノッテコンの横太線よりも前に行きすぎていると考えられます。車いすの固定位置を少しだけ後ろにずらして、操作状況を確認し、変わらないようであれば更に後ろにずらし調整してみましょう。



2. 体を精いっぱい動かしても、ゲームの中では小さい動きにしかない。あるいは、動きが弱く思うように進めない状態。

操作感度が低く、ご本人の動きを大きく反映させる必要があります。

対処方法は、初期設定時（前頁参照）に人が乗ることはせず、**10kg程度**の軽いものを乗せて、初期設定します。これにより操作感度が高まり、少しの動きでも大きく反応するようになります。



安全に使用するために

- ノッテコンを使用するときは、必ず補助する方と一緒にゲームを行って下さい。
- 補助する方は、不随意運動の出現がないか、座位姿勢が崩れていないかなど、利用者の状況を観察しながら、ゲームを行って下さい。
- 車いすに乗ってゲームを行うときは、必ず車いすのブレーキをかけて行って下さい。
- ノッテコンの周囲に不要な物がないか確認し、十分なスペースを確保してください。
- 体調の悪いとき等の使用は避けて下さい。

商品に関するお問い合わせ

特定非営利活動法人 お世話宅配便

〒840-0844 佐賀県佐賀市伊勢町 11-9

TEL/FAX : 0952-26-5271

E-mail : npo_osewa_saga@vir.bbq.jp

URL : <http://npo-osewa.web.infoseek.co.jp/>

